



PROTECTOR BUCAL



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MARCA	ENDOCOL
<p>Nombre del producto:</p> <p>PROTECTOR BUCAL 1 COL PROTECTOR BUCAL 2 COL</p>	
REFERENCIA	PROTECTOR BUCAL 1 COL (ADULTO) PROTECTOR BUCAL 2 COL (PEDIATRICO)
<p>INDICACIONES DE USO:</p> <p>El protector bucal marca EndoCol está diseñado para proteger la cavidad bucal en el diagnóstico o el tratamiento de patologías del tracto digestivo que requieran el uso de equipos biomédicos de endoscopia; así como brindar una protección al equipo biomédico de daños posibles con la dentadura del paciente al momento de realizar el procedimiento.</p>	
<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Puerto central mide 21 x 25mm, compatible con todas las marcas de endoscopios y permite el uso de dilatadores. No reutilizables.</p>	
<p>COMPOSICION:</p> <p>Poliestireno de alto impacto</p>	
<p>PRESENTACION:</p> <p>Unidad</p>	
<p>VIDA ÚTIL:</p> <p>2 AÑOS</p>	

PRECAUCIONES:

La endoscopia debe ser realizada sólo por personas que tengan la experiencia y preparación adecuadas.

Lea atentamente estas instrucciones. Si no se siguen las instrucciones, pueden producirse consecuencias médicas graves.

El embalaje y el dispositivo deben inspeccionarse antes del uso. No utilice el dispositivo si el producto o el embalaje están dañados.

Si el dispositivo no funciona adecuadamente de alguna manera o muestra algún indicio de daño, **NO SE DEBE UTILIZAR**. Llame al Servicio al Cliente de ENDOCOL y devuelva el producto. El tratar de reparar instrumentos que no funcionan o están dañados podría inducir modos de fallo peligrosos durante su uso.

EQUIPO REQUERIDO:

Endoscopio

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente en un lugar limpio y seco.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Retirar el protector bucal de su empaque, colocarlo en la boca del paciente y sujetarlo con la banda de caucho alrededor de la cabeza, después de realizar el procedimiento desechar el protector.

DISPOSICION DE DESECHO:

Después de su uso durante un procedimiento debe desecharse de acuerdo

Modalidad de registro:

Registro sanitario: 2017DM-0016737

. Datos fabricantes: nombre, dirección, teléfono y correo electrónico:

Endocol
Teléfono Celular: +57 311-3870563
E-mail: serclienteendocol@hotmail.com
Calle 9A # 7 – 53

Endo[®] Col