



CARACTERISTICAS:

Cepillo para limpieza de endoscopios.

Material acero inoxidable.

Diámetro 1,8 mm

Reutilizable

INDICACIONES DE USO

Estos cepillos reutilizables están diseñados específicamente para la limpieza de endoscopios flexibles.

Precauciones

- El dispositivo debe ser utilizado por personal calificado en la limpieza de endoscopios flexibles.
- Si el envase del dispositivo está abierto o deteriorado antes de su uso no lo utilice, y solicite su sustitución al proveedor.
- No se recomienda su uso en procedimientos que no sean los que se indican en las instrucciones.

EPISODIOS ADVERSOS

Perforación en los canales internos del endoscopio por cerdas desgastadas o inadecuada manipulación del dispositivo.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco. Rotar el inventario de manera que el dispositivo se utilice antes de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta del envase.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Inspección y preparación

1. Abra el envase y retire del empaque el cepillo de limpieza con cuidado.
2. Desenrolle y extienda el catéter del cepillo con cuidado.
2. Antes de su uso, examine cuidadosamente la unidad para verificar que el cepillo y el envase estéril no hayan sufrido daños durante el transporte.

Uso del cepillo de limpieza en el endoscopio

1. El cepillo de limpieza está diseñado para usar en los endoscopios flexibles disponibles del mercado.
2. Prepare el endoscopio para limpieza manual y lleve puesto el vestuario de protección personal apropiado.

Limpieza de superficies exteriores

1. Cepille y limpie todas las superficies exteriores del endoscopio sumergido con un cepillo blando.

Cepillado de los canales

1. Cepille los canales del endoscopio, mientras este se encuentre sumergido para evitar salpicaduras de solución detergente al extraer el cepillo de limpieza del canal.
2. Limpie de nuevo las cerdas en la solución detergente.
3. Repita la operación hasta que no queden restos de suciedad.

Retiro del dispositivo

1.Extraiga con cuidado el cepillo de limpieza de la entrada de los canales y asegúrese que la varilla no roce, ya que esto podría dañar el cepillo o producir un daño en el equipo.

Prelavado-desinfección y esterilización del dispositivo

1.Sumergir el dispositivo en jabón enzimático por unos minutos (el tiempo recomendado por el fabricante del jabón).

3.Extraer el dispositivo del jabón y realizar la desinfección de alto nivel (el tiempo establecido por el fabricante del desinfectante).

4.Una vez realizada la desinfección, esterilizar en óxido de etileno o baja temperatura según sea el ciclo de la Institución.



CARACTERISTICAS:

Cepillo para limpieza de endoscopios.

Material: teflón.

Diámetro 1,8 mm

Un solo uso

INDICACIONES DE USO

Estos cepillos de un solo uso están diseñados específicamente para la limpieza de endoscopios flexibles.

Precauciones

- El dispositivo debe ser utilizado por personal calificado en la limpieza de endoscopios flexibles.
- Si el envase del dispositivo está abierto o deteriorado antes de su uso no lo utilice, y solicite su sustitución al proveedor.
- No se recomienda su uso en procedimientos que no sean los que se indican en las instrucciones.

EPISODIOS ADVERSOS

-Perforación en los canales internos del endoscopio por inadecuada manipulación.

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar oscuro, seco y fresco. Rotar el inventario de manera que el dispositivo se utilice antes de la fecha de caducidad que figura en la etiqueta del envase.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Inspección y preparación

1. Abra el envase y retire del empaque el cepillo de limpieza con cuidado.
2. Desenrolle y extienda el catéter del cepillo con cuidado.
2. Antes de su uso, examine cuidadosamente la unidad para verificar que el cepillo y el envase estéril no hayan sufrido daños durante el transporte.

Uso del cepillo de limpieza en el endoscopio

1. El cepillo de limpieza está diseñado para usar en los endoscopios flexibles disponibles del mercado.
2. Prepare el endoscopio para limpieza manual y lleve puesto el vestuario de protección personal apropiado.

Limpieza de superficies exteriores

1. Cepille y limpie todas las superficies exteriores del endoscopio sumergido con un cepillo blando.

Cepillado de los canales

1. Cepille los canales del endoscopio, mientras este se encuentre sumergido para evitar salpicaduras de solución detergente al extraer el cepillo de limpieza del canal.
2. Limpie de nuevo las cerdas en la solución detergente.
3. Repita la operación hasta que no queden restos de suciedad.

Retiro del dispositivo

1.Extraiga con cuidado el cepillo de limpieza de la entrada de los canales y asegúrese que la varilla no roce, ya que esto podría dañar el cepillo o producir un daño en el equipo.

2.Despues de su uso, desechar el producto y su envase de acuerdo a las normas del hospital, administrativas y/o de las autoridades locales.